

パールメーカー

Pearl Maker




株式会社 イソメディカルシステムズ



特 長

- ・ 抗生剤の周囲組織への徐放性を考慮した 10mm 径の均一なセメントビーズを簡単に作製できます。
- ・ 術者は、希望する箇所に必要な数量のビーズを配置することができ、留置も可能です。


使用方法

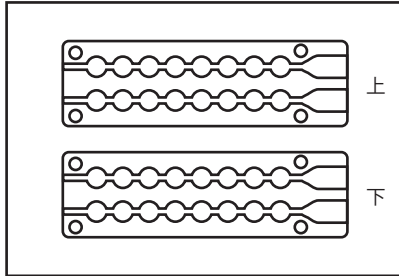


①パールメーカーの上下を重ね合わせます ②専用のクランプでしっかり固定します

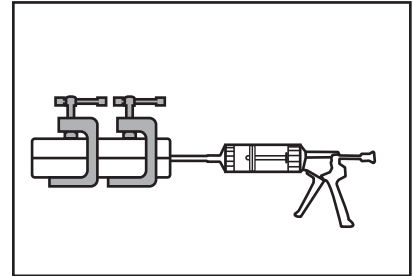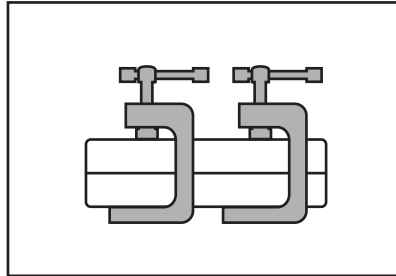


③骨セメントが軟らかい状態でセメントガンを注入口に差し込み、骨セメントが反対側から出てくるまで注入します

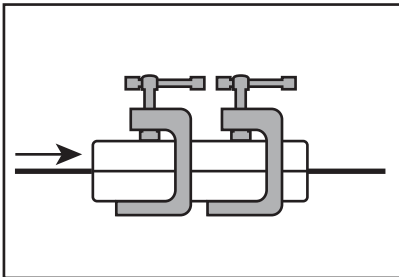

④充填後すぐに排出口側からコアロッドを差し込みます

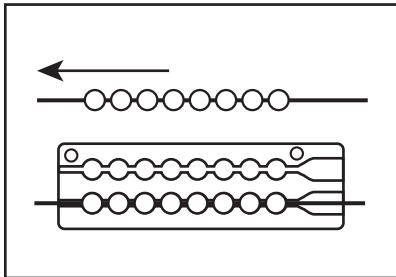

⑤骨セメントが硬化したらクランプを外し、パール形状になった骨セメントからコアロッドを引き抜きます

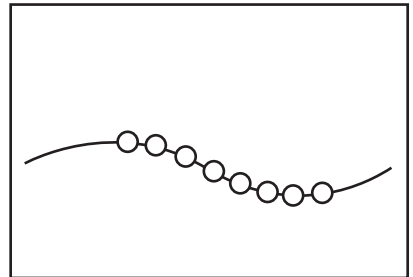


⑥縫合糸、または軟鋼線に通して出来上がりです (セメントビーズ穴径 2mm)


*パールメーカーの骨セメント必要量は一回当たり、約 16 ~ 20g になっております

仕 様

| 品 番 | 商 品 名 | 規 格 |
|--------------|----------------|------------------------|
| 1-180-000-10 | パールメーカーセット | 本体 1個、クランプ 2個、コアロッド 3本 |
| 【 構 成 品 】 | | |
| 1-180-000-11 | パールメーカー 本体 | 直径10mm |
| 1-180-000-02 | パールメーカー用 クランプ | |
| 1-180-000-03 | パールメーカー用 コアロッド | 3本入り (直径2mm) |

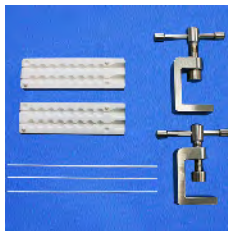


1-180-000-10
パールメーカーセット

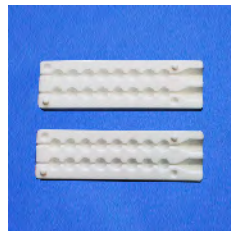

1-180-000-11
パールメーカー 本体



1-180-000-02
パールメーカー用 クランプ

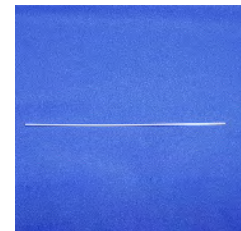

1-180-000-03
パールメーカー用 コアロッド



製造販売元
株式会社 **イソメディカルシステムズ**

〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14
TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022
品目届出番号：12B1X10016000095

監修／筑波大学医学医療系整形外科 西野 衆文先生