

テイクオフ-エックスレイプロテクター 2WAY

Take Off X-Ray Protector 2way



監修 筑波メディカルセンター病院



株式会社 イソメディカルシステムズ

特 長

- ・プロテクター 2WAY は術中にサージカルガウンを脱ぐことなく、簡単に外すことができます。
- ・体型に合わせてフィット感を自由に調節することができます。
- ・ウエストガードを併用すると、肩にかかる負担を大幅に軽減するので長時間の着用に最適です。

使用方法

●テイクオフ-エックスレイプロテクター 2WAY



①背中側のマジックテープをサージカルガウンの上から外します



②前面のマジックテープをサージカルガウンの上から外します



③プロテクターを滑らせて床に落とします

●ウエストガード



①プロテクターの肩の部分で浮かせるように装着すると重量を分散させることができます

仕 様

カラー	品 番	商 品 名		サイズ
 ブルー	1-360-100-01	テイクオフ-エックスレイプロテクター 2WAY	無鉛タイプ	M
	1-360-100-02	テイクオフ-エックスレイプロテクター 2WAY	無鉛タイプ	L
	1-360-100-03	テイクオフ-エックスレイプロテクター 2WAY	無鉛タイプ	L L
 ピンク	1-360-101-01	テイクオフ-エックスレイプロテクター 2WAY	無鉛タイプ	M
	1-360-101-02	テイクオフ-エックスレイプロテクター 2WAY	無鉛タイプ	L
	1-360-101-03	テイクオフ-エックスレイプロテクター 2WAY	無鉛タイプ	L L
 ライラック	1-360-102-01	テイクオフ-エックスレイプロテクター 2WAY	無鉛タイプ	M
	1-360-102-02	テイクオフ-エックスレイプロテクター 2WAY	無鉛タイプ	L
	1-360-102-03	テイクオフ-エックスレイプロテクター 2WAY	無鉛タイプ	L L
 オレンジ	1-360-103-01	テイクオフ-エックスレイプロテクター 2WAY	無鉛タイプ	M
	1-360-103-02	テイクオフ-エックスレイプロテクター 2WAY	無鉛タイプ	L
	1-360-103-03	テイクオフ-エックスレイプロテクター 2WAY	無鉛タイプ	L L
 イエロー	1-360-104-01	テイクオフ-エックスレイプロテクター 2WAY	無鉛タイプ	M
	1-360-104-02	テイクオフ-エックスレイプロテクター 2WAY	無鉛タイプ	L
	1-360-104-03	テイクオフ-エックスレイプロテクター 2WAY	無鉛タイプ	L L
	1-360-010-01	ウエストガード	含鉛タイプ	—

重量：M サイズ 1.8Kg / L サイズ 2.0Kg / L L サイズ 2.2Kg 0.25 mm Pb (鉛当量換算値)

☆ご希望により名入れ致します (別料金)

製造販売元
株式会社保科製作所
〒113-0033 東京都文京区本郷 2-16-13
品目届出番号：13B3X00005000006



発売元
株式会社
イソメディカルシステムズ
〒277-0863 千葉県柏市豊四季 495-14
TEL 04(7141)4021 FAX 04(7141)4022