

S-スプリント

S-SPLINT



株式会社 イソメディカルシステムズ

仕様

プレカット



品番	規格		
	種類	サイズ	枚/箱
1-710-003-11	3号A	7.5cm×30.5cm	5
1-710-003-02	3号B	7.5cm×89cm	5
1-710-004-11	4号A	10cm×38cm	5
1-710-004-02	4号B	10cm×76cm	5
1-710-005-01	5号	12.5cm×76cm	5

フリーカット



品番	規格		
	種類	サイズ	ロール/箱
1-711-002-01	2号	5cm×4.5m	1
1-711-003-01	3号	7.5cm×4.5m	1
1-711-004-01	4号	10cm×4.5m	1
1-711-005-01	5号	12.5cm×4.5m	1

使用手順

プレカット



1 アルミパッケージからS-スプリントプレカットを開封して取り出します。



2 取り出したS-スプリントを水で十分に浸し、図のように強く絞ります。



3 タオル等で余分な水分を吸い取ります。



4 絞ったS-スプリントをモールドイング（使用部位に合わせた形作り）をしながら弾性包帯で固定します。

フリーカット



1 ロール状のS-スプリントフリーカットを適切な長さになるようはさみでカットします。（切断面の不快感による処理は不要です）



2 残ったS-スプリントのアルミパッケージをクリップします。この際、出来るだけアルミパッケージ内の空気を取り除き、残ったS-スプリントの端を数cm程度折り曲げておきます。



3 取り出したS-スプリントを水で十分に浸し、図のように強く絞ります。



4 タオル等で余分な水分を吸い取ります。



5 絞ったS-スプリントをモールドイング（使用部位に合わせた形作り）をしながら弾性包帯で固定します。

特長

- ・パッド部分の表裏両面には撥水加工が施してあり、湿った不快感を軽減させます。
- ・グラスファイバー素材により、軽量化と優れたサポート力を実現します。
- ・N-スプリントと比較して硬化速度を早めに設定しており、作業効率を向上させます。



製造販売元
株式会社 **イソメディカルシステムズ**

〒277-0863 千葉県柏市豊四季 495-14

TEL 04(7141)4021 FAX 04(7141)4022

URL: <http://www.isomed.co.jp/>

S-スプリント プレカット 品目届出番号：12B1X10016000114

S-スプリント フリーカット 品目届出番号：12B1X10016000115