

N-スプリント

N-SPLINT



株式会社 イソメディカルシステムズ

仕様

プレカット



品番	規格		
	種類	サイズ	枚/箱
1-700-003-11	3号A	7.5cm×30.5cm	5
1-700-003-02	3号B	7.5cm×89cm	5
1-700-004-11	4号A	10cm×38cm	5
1-700-004-02	4号B	10cm×76cm	5
1-700-005-01	5号	12.5cm×76cm	5

フリーカット




品番	規格		
	種類	サイズ	枚/箱
1-701-002-01	2号	5cm×4.5m	1
1-701-003-01	3号	7.5cm×4.5m	1
1-701-004-01	4号	10cm×4.5m	1
1-701-005-01	5号	12.5cm×4.5m	1
1-701-006-01	6号	15cm×4.5m	1

使用手順

プレカット



アルミパッケージからN-スプリントプレカットを開封して取り出します。

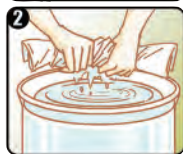

取り出したN-スプリントを水で十分に浸し、図のように強く絞ります。
(よく濡らし、よく絞ることで強度を高め、硬化速度も速くさせます)



絞ったN-スプリントをモールドイング(使用部位に合わせた形作り)をしながら弾性包帯で固定します。

フリーカット



ロール状のN-スプリントフリーカットを適切な長さになるようはさみでカットします。
(切断面の不快感による処理は不要です)



残ったN-スプリントのアルミパッケージをクリップします。この際、出来るだけアルミパッケージ内の空気を取り除き、残ったN-スプリントの端を数cm程度折り曲げておきます。



取り出したN-スプリントを水で十分に浸し、図のように強く絞ります。
(よく濡らし、よく絞ることで強度を高め、硬化速度も速くさせます)



絞ったN-スプリントをモールドイング(使用部位に合わせた形作り)をしながら弾性包帯で固定します。

特長

- ・装着したままのレントゲン撮影を可能とし、クリアな画像を得ることができます。
- ・芯材の粘り気が少ないのでお使いになるはさみの切れ味が長持ちします。
- ・切断面の「チクチク感」が全くないので端を折り曲げたり、表皮材を伸ばすなどの処理が不要です。
- ・企業努力により安い価格設定を実現しました。



グラスファイバー使用製品



N-スプリント



製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季 495-14

TEL 04(7141)4021 FAX 04(7141)4022

URL: <http://www.isomed.co.jp/>

N-スプリント フリーカット 品目届出番号: 12B1X10016000074

N-スプリント プレカット 品目届出番号: 12B1X10016000075