

パールメーカー

Pearl Maker




株式会社 イソメディカルシステムズ


特 長

- ・ 抗生剤の周囲組織への徐放性を考慮した10mm径の均一なセメントビーズを簡単に作製できます。
- ・ 術者は、希望する箇所に必要な数量のビーズを配置することができ、留置も可能です。


使用方法

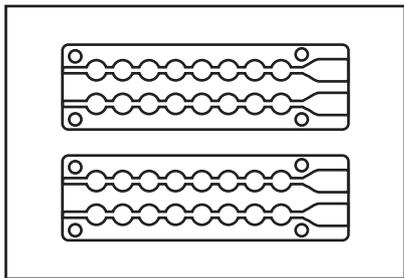


①パールメーカーの上下を重ね合わせます

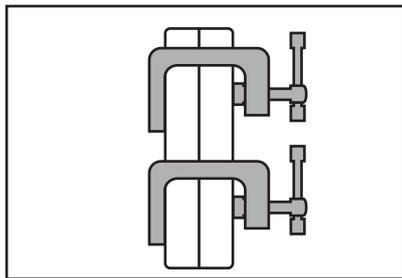


②専用のクランプでしっかり固定します

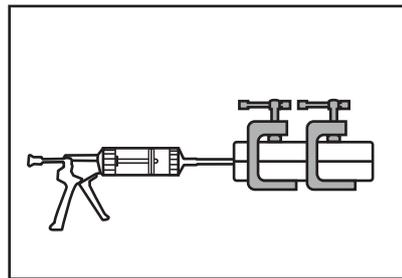


③骨セメントが軟らかい状態でセメントガン
を注入口に差し込み、骨セメントが反対側
から出てくるまで注入します

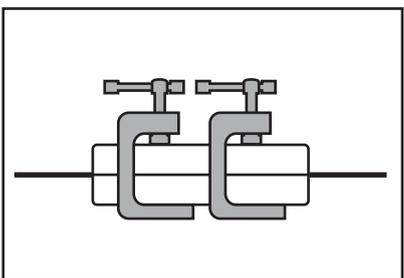

④充填後すぐに排出口側からコアロッドを
差し込みます

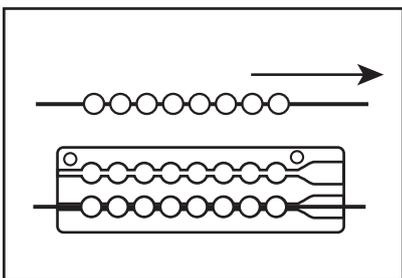

⑤骨セメントが固まったらクランプを
外し、パール形状になった骨セメント
をコアロッドから引き抜きます

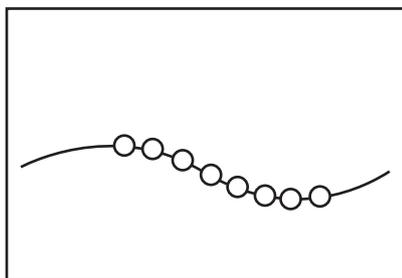


⑥縫合糸、または軟鋼線に通して出来
上がりです（セメントビーズ穴径2mm）

*パールメーカーの骨セメント必要量は一回当たり、約16～20gになっております

仕 様

品 番	商 品 名	規 格
1-180-000-10	パールメーカーセット	本体1個、クランプ2個、コアロッド3本
【構成部品】		
1-180-000-11	パールメーカー 本体	直径10mm 8連×2
1-180-000-02	パールメーカー用 クランプ	
1-180-000-03	パールメーカー用 コアロッド	3本入り（直径2mm）

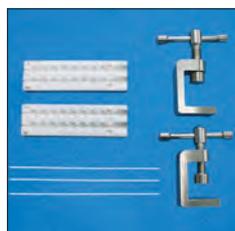

1-180-000-10
パールメーカーセット



1-180-000-11
パールメーカー 本体



1-180-000-02
パールメーカー用 クランプ



1-180-000-03
パールメーカー用 コアロッド



製造販売元

株式
会社

イソメディカルシステムズ

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季 495-14

TEL 04(7141)4021 FAX 04(7141)4022

URL: <http://www.isomed.co.jp/>

品目届出番号：12B1X10016000095