

ロータリー ケリソン ロンジュール

ROTARY KERRISON RONGEUR



株式会社 イソメディカルシステムズ

特 長


- ・シャフト部を回転させる事で、刃の向きを7方向の任意の位置に設置する事ができます。
- ・SCHWARZコーティングで切れ味の耐久性を向上させ、ハレーションも抑制します。
- ・シャフト部は分解が可能のため、ご使用後に付着した汚れを容易に洗浄する事ができます。

使用方法

1.シャフトとハンドルの装着



①シャフト部分をハンドルに挿入します。

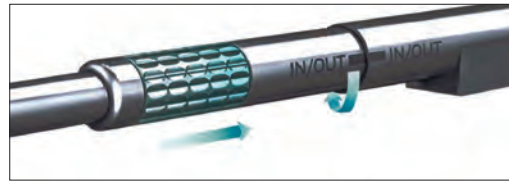

②ハンドルの黒い線とシャフト部の黒い線を合わせます。シャフト部を引き寄せながら左に回転させ装着します。

2.シャフトとハンドルの分離



①シャフト部を引きながら右に回転させます。ハンドルの黒い線とシャフト部の黒い線を合致させると分離する事ができます。

3.シャフトの分解



①シャフトの最後部のネジを緩め、内筒とスプリングを外します。



②先端のT溝の上部シャフト部を持ち上げ、外します。洗浄と滅菌は4つのパーツに分解して行えます。

仕 様

	品 番	商 品 名	規 格		
			シャフト長	先 端 幅	形 状
①	1-110-110-00	ロータリーケリソンロンジュール ハンドル			
②	1-110-110-01	ロータリーケリソンロンジュール シャフト	20cm	1mm	40° 直
③	1-110-110-02	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		2mm	
④	1-110-110-03	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		3mm	
⑤	1-110-110-04	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		4mm	
⑥	1-110-110-05	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		5mm	
⑦	1-110-120-01	ロータリーケリソンロンジュール シャフト	23cm	1mm	40° 直
⑧	1-110-120-02	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		2mm	
⑨	1-110-120-03	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		3mm	
⑩	1-110-120-04	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		4mm	
⑪	1-110-120-05	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		5mm	
⑫	1-110-111-02	ロータリーケリソンロンジュール シャフト	20cm	2mm	40° 弱上弯
⑬	1-110-111-03	ロータリーケリソンロンジュール シャフト	3mm		
⑭	1-110-121-02	ロータリーケリソンロンジュール シャフト	23cm	2mm	
⑮	1-110-121-03	ロータリーケリソンロンジュール シャフト	3mm		
⑯	1-110-112-02	ロータリーケリソンロンジュール シャフト	20cm	2mm	40° 弱下弯
⑰	1-110-112-03	ロータリーケリソンロンジュール シャフト	3mm		
⑱	1-110-122-02	ロータリーケリソンロンジュール シャフト	23cm	2mm	
⑲	1-110-122-03	ロータリーケリソンロンジュール シャフト	3mm		

イ
ジ
エ
ク
タ
ー
付

※⑦～⑱は受注発注になります。納期は担当営業にご確認下さい。



シャフト(弱上弯)



シャフト(直)



シャフト(弱下弯)



ハンドル



製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季 495-14

TEL 04(7141)4021 FAX 04(7141)4022

URL: <http://www.isomed.co.jp/>

品目届出番号：12B1X10016000014