
ニー・ポジショナー TI-10

KNEE POSITIONER TI-10



株式会社 イソメディカルシステムズ


特 長

- ・スライディングコネクターのクロスハンドルを締めることにより、前後左右の動きを同時に固定できる構造になっているため術者の希望するポジションを簡単に得ることができます。
- ・フットサポートとスライディングコネクターとの着脱がワンタッチで可能なため、必要に応じて術中の可動域チェック等が容易におこなえます。
- ・すべてのパーツは高圧蒸気滅菌・EOG滅菌が可能です。
- ・ユニバーサルクランプを使用することによりオイフ等の上から手術台に容易に設置できます。
- ・少人数での手術が可能です。


使用方法



1 必要に応じて手術台の足板のマットを取り除いた後、手術台にオイフを敷き、その上に本器を設置します。

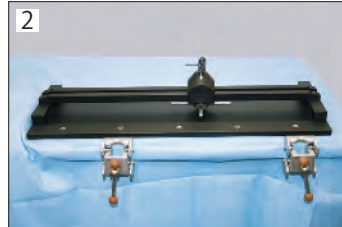

2 最大屈曲位がとれるように患者と本器の位置を調整し、ユニバーサルクランプ2個を手術台のサイドレールにオイフの上から設置します。

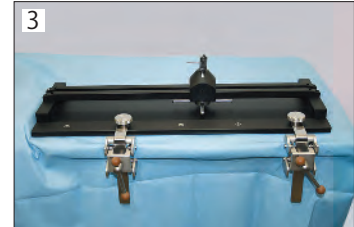

3 L型固定バーをベースプレートのスクリューホール及びユニバーサルクランプに取り付け、各部のネジを締め固定します。



4-a フットサポートに患肢を載せ、下腿部を包帯等で固定します。必要に応じて足部も固定します。この際、褥創等予防のため、スポンジなどの緩衝材のご使用をお奨めします。



4-b フットサポートをスライディングコネクターに取り付けてから患肢を包帯等で固定することも可能です。



5 フットサポートをスライディングコネクターに取り付けます。



6 ご希望のポジションが得られたところで、スライディングコネクターのクロスハンドルを締め、固定します。

使用上の注意

- ・滅菌後ご使用ください。
- ・洗浄は中性洗剤をご使用ください。
- ・各部ネジの緩みがない事を確認し、ご使用ください。

適 応

- ・人工膝関節形成術等

仕 様

品 番	商 品 名	規 格
1-502-000-00	ニー・ポジショナー TI-10	全長670mm 全幅240mm 総重量8kg

※ スライド範囲545mm



製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季 495-14

TEL 04(7141)4021 FAX 04(7141)4022

URL: <http://www.isomed.co.jp/>

品目届出番号：12B3X10004000076