

N-スプリント

N-SPLINT



**ISO MEDICAL
SYSTEMS**

株式会社 イソメディカルシステムズ

仕様

プレカット



品番	規格		
	種類	サイズ	枚/箱
1-700-003-11	3号A	7.5cm×30.5cm	5
1-700-003-02	3号B	7.5cm×89cm	5
1-700-004-11	4号A	10cm×38cm	5
1-700-004-02	4号B	10cm×76cm	5
1-700-005-01	5号	12.5cm×76cm	5

フリーカット



品番	規格		
	種類	サイズ	枚/箱
1-701-002-01	2号	5cm×4.5m	1
1-701-003-01	3号	7.5cm×4.5m	1
1-701-004-01	4号	10cm×4.5m	1
1-701-005-01	5号	12.5cm×4.5m	1
1-701-006-01	6号	15cm×4.5m	1

使用手順

プレカット



① アルミパッケージからN-スプリントプレカットを開封して取り出します。



② 取り出したN-スプリントを水で十分に浸し、図のように強く絞ります。
(よく濡らし、よく絞ることで強度を高め、硬化速度も速くさせます)




③ 絞ったN-スプリントをモールドイング(使用部位に合わせた形作り)をしながら弾性包帯で固定します。

フリーカット



① ロール状のN-スプリントフリーカットを適切な長さになるようはさみでカットします。
(切断面の不快感による処理は不要です)

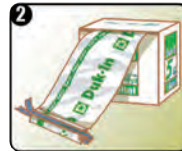

② 残ったN-スプリントのアルミパッケージをクリップします。この際、出来るだけアルミパッケージ内の空気を取り除き、残ったN-スプリントの端を数cm程度折り曲げておきます。



③ 取り出したN-スプリントを水で十分に浸し、図のように強く絞ります。
(よく濡らし、よく絞ることで強度を高め、硬化速度も速くさせます)



④ 絞ったN-スプリントをモールドイング(使用部位に合わせた形作り)をしながら弾性包帯で固定します。

特長

- ・装着したままのレントゲン撮影が可能で、クリアな画像を得ることができます。
- ・芯材の粘り気が少ないのでハサミでのカットが容易です。
- ・切断面の「チクチク感」が全くないので端を折り曲げたり、表皮材を伸ばすなどの処理が不要です。
- ・企業努力によりお求めやすい価格を実現しました。



グラスファイバー使用製品



N-スプリント



製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季 495-14

TEL 04(7141)4021 FAX 04(7141)4022

URL: <https://www.isomed.co.jp/>

N-スプリント フリーカット 品目届出番号: 12B1X10016000074

N-スプリント プレカット 品目届出番号: 12B1X10016000075