

# QUICK KERRISON RONGEURS

## クイックケリソンロンジュール

簡単に分解・組立ができ、清潔に使用することができます。



### ■主な特長

シャフトの分解・組立  
が3ステップで行えます。

内部の洗浄ができ清潔に使用  
することができます。

ハンドル部にバネ構造がないため  
手袋が引っかかりません。

### 本製品特長



- ・3ステップで分解・組立が可能です。シャフト内部も洗浄することができ清潔を保てます。
- ・ハンドル部にバネ構造がないシンプルな形状で、手袋が引っ掛かることはありません。
- ・バネ内部構造によりシャフトの動きがスムーズです。
- ・ハンドルはコンパクトながら、先端幅14mmのラージマウスを実現しました。
- ・SCHWARZ コーティングにより切れ味の耐久性を向上させ、ハレーションも抑制します。

### 使用方法

#### 1. 分解の手順

<p><b>1.</b> 右手で図のように本器をもちます</p>	<p><b>2.</b> 図のように親指が上部シャフトにつくように本器を持ちます</p>	<p><b>3.</b> 上部シャフトをハンドルが自由に動くまで左側に押します</p>	<p><b>4.</b> リリースボタンを押します</p>
<p><b>5.</b> ハンドルを下に引き下ろします</p>	<p><b>6.</b> 親指を離すとシャフトがバネの力で自然に右へスライドします</p>	<p><b>7.</b> ハンドルを左手で持ち、右手で上部シャフトを取り外します</p>	<p><b>8.</b> 本器を分解して洗浄の準備が完了です</p> <p>上部シャフトを本体に付けて洗浄する事が出来ます</p>

#### 2. 組立の手順

<p><b>1.</b> 先端のT字ガイド溝に上部シャフトの先端を差し込みます</p>	<p><b>2.</b> *シャフトは押したままにします</p>	<p><b>3.</b> リリースボタンのロック音が聞こえるまでハンドルを上に向け押します</p>	<p><b>4.</b> 本器の使用準備が整いました</p>
---	----------------------------------	---	--------------------------------

### 仕様

①	品番	商品名	規格			イジエクター付
			長さ	先端幅	角度	
①	1-110-200-01ST	クイックケリソンロンジュール(スーパーシン)	18 c m	1mm	40° 上向	
②	1-110-200-02	クイックケリソンロンジュール		2mm		
③	1-110-200-03	クイックケリソンロンジュール		3mm		
④	1-110-200-04	クイックケリソンロンジュール		4mm		
⑤	1-110-200-05	クイックケリソンロンジュール	18 c m	5mm	40° 上向	
⑥	1-110-210-01ST	クイックケリソンロンジュール(スーパーシン)	20 c m	1mm	40° 上向	
⑦	1-110-210-02	クイックケリソンロンジュール		2mm		
⑧	1-110-210-03	クイックケリソンロンジュール		3mm		
⑨	1-110-210-04	クイックケリソンロンジュール		4mm		
⑩	1-110-210-05	クイックケリソンロンジュール		20 c m		

※⑤⑩は受注生産になります。納期は担当営業にご確認下さい。



製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季 495-14  
TEL 04(7141)4021 FAX 04(7141)4022

URL: <https://www.isomed.co.jp/>

品目届出番号: 12B1X10016000014



▲製品詳細サイト