

ROTARY KERRISON RONGEURS

ロータリーケリソンロンジュール

回転可能、分解可能な新発想のケリソンパンチです。




■主な特長

45度ごと、7方向に
回転することができます。
手の角度を変えることなく
手元で狙った角度に調整できます。
術者の視野がハンドルによって
妨げられず使用することができます。

本製品特長

- ・シャフト部を回転させることで、刃の向きを7方向の任意の位置に設置することができます。
- ・SCHWARZ コーティングにより切れ味の耐久性を向上させ、ハレーションも抑制します。
- ・シャフト部は分解が可能なため、ご使用後に付着した汚れを容易に洗浄することができます。

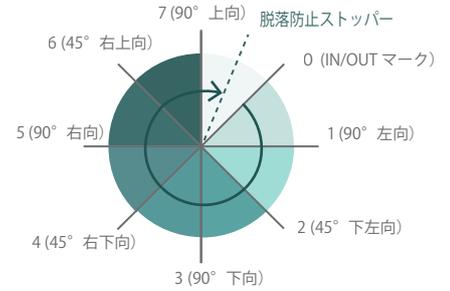

使用方法

1. シャフトとハンドルの装着



①シャフト部をハンドルに挿入します。



②ハンドルの IN/OUT 線とシャフト部の IN/OUT 線を合わせます。シャフト部を引き寄せながら左に回転させ装着します。

2. シャフトとハンドルの分離



①シャフト部を引きながら右に回転させます。ハンドルの IN/OUT 線とシャフト部の IN/OUT 線を合わせることで分離することができます。

3. シャフトの分解



①シャフト部の最後部のネジを緩め、内筒とスプリングを外します。



②先端の T 溝の上部シャフト部を持ち上げ、外します。洗浄と滅菌は4つのパーツに分解して行えます。

仕様

①	品番	商品名	規格			
			ハンドル	ブラックコーティング		
①	1-110-110-00	ロータリーケリソンロンジュール ハンドル	20 c m	1mm	40° 直	イジェクター付 ブラックコーティング
②	1-110-110-01	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		2mm		
③	1-110-110-02	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		3mm		
④	1-110-110-03	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		4mm		
⑤	1-110-110-04	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		5mm		
⑥	1-110-110-05	ロータリーケリソンロンジュール シャフト				
⑦	1-110-120-01	ロータリーケリソンロンジュール シャフト	23 c m	1mm	40° 直	
⑧	1-110-120-02	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		2mm		
⑨	1-110-120-03	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		3mm		
⑩	1-110-120-04	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		4mm		
⑪	1-110-120-05	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		5mm		
⑫	1-110-111-02	ロータリーケリソンロンジュール シャフト	20 c m	2mm	40° 弱上弯	
⑬	1-110-111-03	ロータリーケリソンロンジュール シャフト	3mm			
⑭	1-110-121-02	ロータリーケリソンロンジュール シャフト	23 c m	2mm	40° 弱上弯	
⑮	1-110-121-03	ロータリーケリソンロンジュール シャフト	3mm			
⑯	1-110-112-02	ロータリーケリソンロンジュール シャフト	20 c m	2mm	40° 弱上弯	
⑰	1-110-112-03	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		3mm		
⑱	1-110-122-02	ロータリーケリソンロンジュール シャフト	23 c m	2mm	40° 弱上弯	
⑲	1-110-122-03	ロータリーケリソンロンジュール シャフト		3mm		

※⑦～⑱は受注生産になります。納期は担当営業にご確認下さい。



ハンドル



シャフト(直)



シャフト(弱上弯)



シャフト(弱下弯)



製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季 495-14

TEL 04(7141)4021 FAX 04(7141)4022

URL: <http://www.isomed.co.jp/>

品目届出番号: 12B1X10016000014



▲製品詳細サイト