

ISO LT-2000 LP

腹臥位用手術架台

イソLT-2000 LP 四点支持マット2種類(STD・C)付

本体の高さを低く設計し、広いワーキングスペースを確保したロープロファイルタイプの手術用架台です。マットは大小2種類あり、患者の体格・体型に合ったものを選択できます。全てのパーツにX線透過性の素材を使用しているので様々な角度からの透視画像撮影が可能です。新たに四点支持プレートを支えるスライドバーにX線透過性に優れた炭素繊維強化プラスチック(CFRP)を採用。内部を中空にしたことで、よりクリアな画像で観察いただけます。

スライドバー



従来のLTスライドバー



イソLT-2000LPスライドバー

■適応

- 脊椎後側方手術全般
- 胸腔鏡下食道切除術
- 経皮的腎砕石術 (PNL)
- 経皮的腎瘻造設術 (PNS)



本製品特長

ロープロファイル

本体フレームはカセット挿入口を省くことで高さを低くし、十分なワーキングスペースを確保したデザインです。不要な構造を省くことで耐荷重性が十分にありながら軽量でセッティングも容易です。



X線透過性向上

スライドバーに中空の炭素繊維強化プラスチック (CFRP) を採用しているため、よりクリアな画像で観察いただけます。

本体外形寸法 (マット無) : 500(L)×420(W)×116(H)mm
総重量 : 約 7kg

高性能ゲル素材を採用

四点支持マットに用いられている EXGEL[®] は優れた弾力性・流動性・柔軟性をもち、高い体圧分散性を可能にしています。

表面は接触圧力が均等になるように凹凸加工が施されており、反発力を抑えて身体に素早くフィッティングします。

(EXGEL[®] は株式会社加地の登録商標です)

患者の体格に合わせたセッティング

四点支持マットは腹部への圧迫を十分に逃がすために切り欠きを広くとった設計になっています。大小 2 種類あり、患者の体格や体型によって選択いただけます。マットの位置は本体のスライド機能で頭尾・左右方向に調節可能です。

頭尾方向のスライド機能



調節巾 : 0 ~ 210mm

左右方向のスライド機能




調節巾 : 0 ~ 110mm

仕様

品番	商品名	規格
1-501-200-30	イソLT-2000	LP 四点支持マット 2 種類 (STD・C) 付

【本製品マット構成】

品番	商品名	規格	数量
① 1-501-000-07	四点支持マット	Cタイプ 右胸部・左腰部共用	2
② 1-501-000-08	四点支持マット	Cタイプ 左胸部・右腰部共用	2
③ 1-501-000-30	四点支持マット	STDタイプ 右胸部・左腰部共用	2
④ 1-501-000-31	四点支持マット	STDタイプ 左胸部・右腰部共用	2

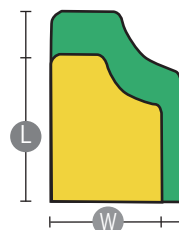

寸法 (mm)

- ①② 181(L)×135(W)×79(H)
- ③④ 235(L)×150(W)×89(H)

アクセサリ (別売)

※詳細は「四点支持プレート用スペーサー」「マットカバー」「マットカバープレミアム」のカタログをご覧ください。

四点支持プレート用スペーサー Cタイプ



フラット 40mm

身体の大きい患者の腹部が接地するのを防ぎます。



15° (傾斜)

四点支持マットに傾斜をつけたいときに使用します。



後弯 17°

患者に後弯をつけたいときに使用します。

マットカバー マットカバープレミアムC



通気性・透湿性に優れた素材を使用した専用マットカバーです。マットを清潔に保ち、清拭の手間を大幅に軽減します。(単回使用)

品番	商品名	規格
1-501-000-100	四点支持プレート用スペーサー	Cタイプ フラット40mm 右胸部・左腰部共用
1-501-000-101		Cタイプ フラット40mm 左胸部・右腰部共用
1-501-000-102		Cタイプ 15° 右胸部・左腰部共用
1-501-000-103		Cタイプ 15° 左胸部・右腰部共用
1-501-000-104		Cタイプ 後弯17° 右胸部・左腰部共用
1-501-000-105		Cタイプ 後弯17° 左胸部・右腰部共用
1-501-000-50	マットカバー 四点フレーム用*	1箱12セット (48枚入)
1-501-000-60	マットカバープレミアム 四点フレーム用*	1箱6セット (24枚入)
1-501-000-61	マットカバープレミアムC 四点フレーム用*	1箱6セット (24枚入)

* 単回使用

製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14

TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022

URL: <https://www.isomed.co.jp/>

品目届出番号 : 12B1X10016000138



▲製品詳細サイト