

病床用の使用例

身体のラインに沿って変形するので、褥瘡の好発部位である仙骨部や後頭部・肩甲骨部等の骨突出部に合わせて体圧を分散させ、せん断ストレスや組織歪力の発生を抑えます。



背中へのクッションとして使用



抱き枕として使用

仙骨部の保護として使用



枕として使用



丸めて膝裏に入れる



側臥位時の使用例



踵の保護として使用

仕様

品番	商品名	規格 (mm)	販売単位
1-501-161-20	サスティーン	厚さ 5mm×長さ 1900mm×幅 500mm 2枚入	1セット
1-501-161-21	サスティーン	厚さ 10mm×長さ 1900mm×幅 500mm	1枚
1-501-161-22	サスティーン	厚さ 20mm×長さ 1900mm×幅 500mm	1枚
1-501-161-23	サスティーン	厚さ 30mm×長さ 1900mm×幅 500mm	1枚
1-501-161-24	サスティーン	厚さ 40mm×長さ 1900mm×幅 500mm	1枚
1-501-161-30	サスティーン	アームレスト用 8個入	1セット
1-501-161-50	サスティーン	プレカット 33 厚さ 10/20/30/40 各 1枚入	1セット
1-501-161-51	サスティーン	プレカット 33 厚さ 10 3枚入	1セット
1-501-161-52	サスティーン	プレカット 33 厚さ 20 3枚入	1セット
1-501-161-53	サスティーン	プレカット 33 厚さ 30 3枚入	1セット
1-501-161-54	サスティーン	プレカット 33 厚さ 40 3枚入	1セット

サスティーン フェイスフレーム用

『フェイスフレーム』、『ヘッドレスト』（イソ KMP プラス）兼用品です。
マットカバーと組み合わせることで、額や頬にかかる局所的な圧迫を防ぎます。
※詳細は『フェイスフレーム/ヘッドレスト アクセサリー』のカタログをご覧ください。



※単回使用



▲製品詳細サイト

製造販売元
株式会社 **イソメディカルシステムズ**
本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14
TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022
URL: <https://www.isomed.co.jp/>



Sustain

サスティーン

とても柔らかくキメの細かい低反発ウレタンフォームシートです。肌触りが良く、肌をやさしく包みます。



■主な特長

ソフト&スムーズ
高い通気性&透湿性
操作性&経済性
組み合わせてプラスαの効果

株式会社 **イソメディカルシステムズ**

本製品特長

マルチユース、操作性の良さ

厚みのバリエーションが豊富で患者の体重や部位に合わせて使い分けができます。思い通りの大きさにカットできるので幅広い用途や目的に使用できます。

肌に優しい柔らかさ

肌触りが良く、身体にフィットして優しく包みます。皮膚への影響が少ないラテックスフリー素材。


高耐久性、メンテナンスの良さ

リユースタイプ。耐久性が高く、へたりにくい素材です。洗濯機、乾燥機の使用が可能で（耐熱 80℃まで）お手入れが簡単です。（オートクレーブ不可）

体圧分散性

高密度・低反発・オープンセル構造のウレタンフォーム素材のため、体圧分散性に優れ局所的な圧迫を防ぎます。

仰臥位安静時の体圧分散比較

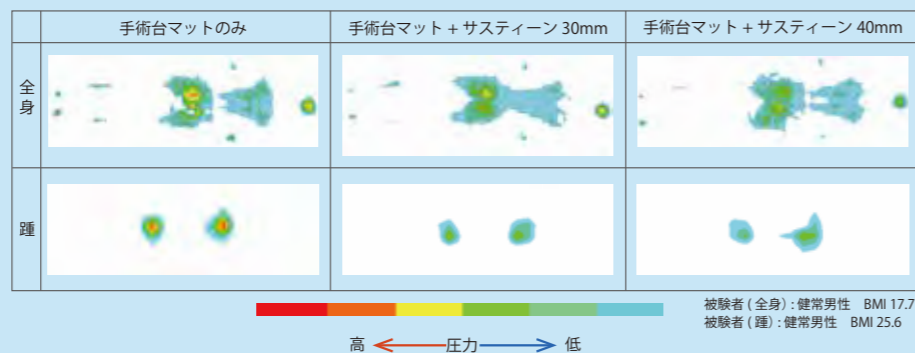

体圧

ずれ

摩擦

マイクロ
クライメット

摩擦、ずれを緩和・吸収

伸縮性の高い素材により摩擦、ずれに対応し、身体側の歪みを吸収・緩和させます。

摩擦を軽減

ソフトできめの細かい高密度ウレタンフォーム素材を採用、皮膚との摩擦を軽減します。
(硬さ 約49N 密度 約55Kg/m³)




『サスティーン』の断面
(きめが細かくスムーズ)




普通のウレタンフォームの断面
(気泡が粗くざらついている)

高い通気性・透湿性

オープンセル構造で通気性・透湿性に優れているため、蒸れを抑え快適にご使用いただけます。

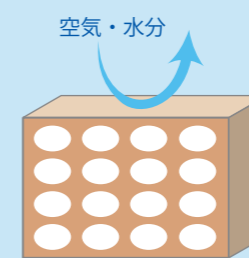

クローズドセル構造

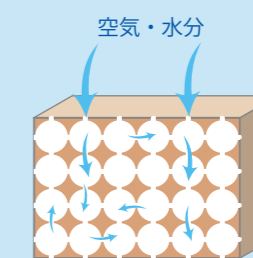

オープンセル構造(連続気泡)



『サスティーン』は水蒸気を通します

主な使用方法

LAY 敷く 用途に合わせた厚さを選んで



OVERLAY 重ねる 重ねて高さ調整、体圧分散の向上



COMBINE 組み合わせる 他のマットや器具と組合せ

他のマットとの組合せ



柔らかさ、肌ざわり、体圧分散の向上、通気性、透湿性の向上

手台との組合せ



柔らかさ、体圧分散の向上、通気性、透湿性の向上

四点支持台との組合せ



体圧分散の向上、通気性、透湿性の向上

ROLL 巻く 用途に合わせた太さに巻いて


抱き枕として



下肢の補助枕として



APPLY 当てる 固定具との間に当てて圧迫を軽減

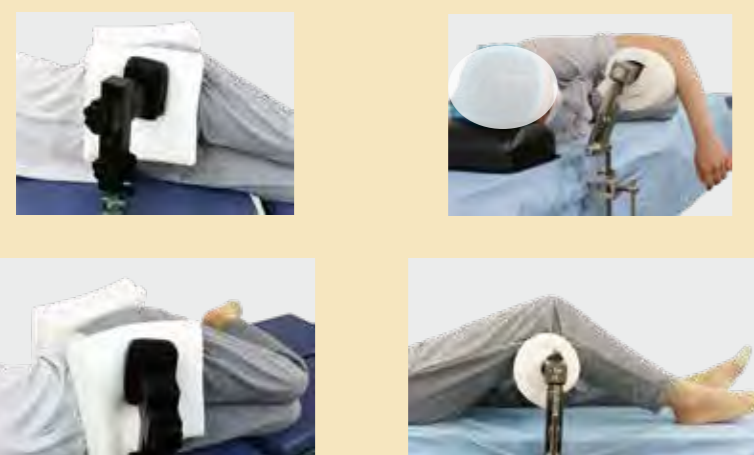

INSERT 挟む

腋窩に挟む



下肢に挟む



FOLD 折る

折って肩枕に




折って高さ調整



PROTECT 保護する

足を保護する

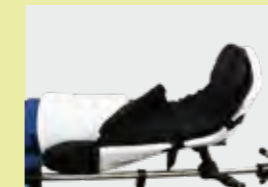

頭を保護する



WRAP 包む

手を包む



足を包む



COVER 覆う

枕



円座



肌ざわり、体圧分散の向上、通気性、透湿性の向上