



フィジール
PHYSEEL




Thermo Fit

Mold itself to fit the patient's features.

サーモフィット パディ

『サーモフィット パディ』は体温により柔らかく変形し、より柔軟な接触面が身体を優しく包み込むことで最適な体位安定性を実現する、新素材のパッドです。

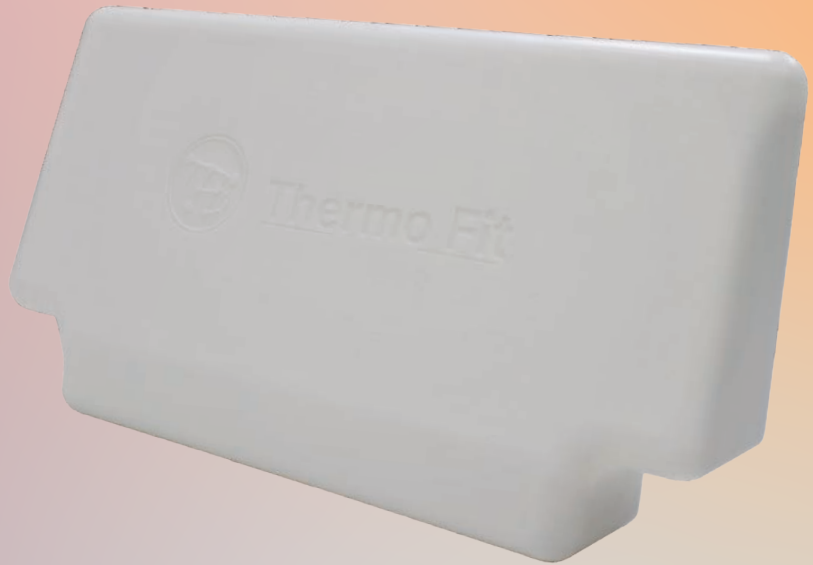

■主な特長

患者の様々な臥位姿勢や
座位姿勢に合わせた形状で
ベッド上でも車椅子上でも滑りにくく
フィット性と支持性の適度なバランスを備えています

本製品特長

ベッド上、車椅子上での活用は？

- ・状態に応じた安定した姿勢（体位）を保持するために、カタチをくさび型としました。くさび型にすることにより、体位に角度をつけたり一方向に壁を作り姿勢を安定させることなどが可能となります。



高密度・低反発素材を採用

- ・くさび形状による効果と温度変化や荷重による可塑性を有した弾性体により、違和感のない安定した体位保持を手助けします。

※低温時には硬くなります。25℃付近を境に硬度変化する仕様で、冬場の病棟内室温（23-25℃）での利用を想定しています。体温の影響により、しだいに柔らかくなる特性を持っています。




『サーモフィットパディカバー』



『サーモフィットパディ感染対策カバー』

専用のディスプレイカバー

- ・ディスプレイの『サーモフィットパディカバー』および『サーモフィットパディ感染対策カバー』をオプションでご用意、いつも清潔にご使用いただけます。
- ・専用のカバーですのでシワが寄りにくく、着脱もスムーズです。

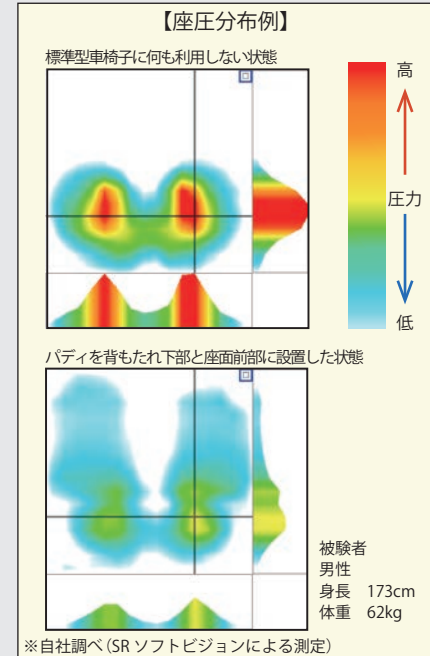


仕様

品番	商品名	規格
1-501-160-32	サーモフィット	パディ 高密度ウレタンフォーム サイズ：W400×H210×D60

アクセサリ（別売）

品番	商品名	規格
1-501-000-97	サーモフィットパディカバー	1箱4セット（20枚入）
1-501-000-99	サーモフィットパディ感染対策カバー	1袋（10枚入）

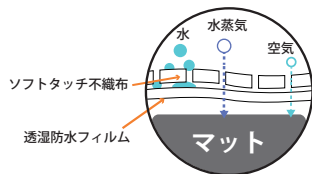

サーモフィットパディ専用 「サーモフィットパディ カバー」

通気性と透湿性のある肌に優しい素材を使用。
特殊な二重構造で、肌の摩擦・ずれを軽減します。

サーモフィットパディ専用 「サーモフィットパディ感染対策カバー」

塩素や可塑性を含まない柔軟性の高いオレフィン素材を使用。
消毒薬やアルコールでの清拭が可能です。

使用上の注意

- ・本製品は洗濯できません。汚れを気にされる場合は、アクセサリ（別売）の『サーモフィットパディ カバー』、『サーモフィットパディ感染対策カバー』をご使用ください。

製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**
本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14
TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022
URL: <https://www.isomed.co.jp/>



▲製品詳細サイト