




SUSTAIN STRAP

サスティーンストラップ / サスティーンストラップ用クッション

面ファスナーにより簡単にすばやく付け外すことができる患者用固定ベルトです。

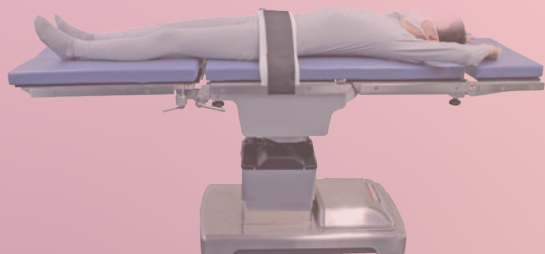

■特長

- ・ 付け外しが簡単な
面ファスナー
- ・ 低反発フォーム
『サスティーン』をクッション
に使用

本製品特長



面ファスナー

- 『サスティーンストラップ』は、面ファスナーによる固定のため簡単にすばやく付け外しが可能です。

繰り返し使用可能


- 単回使用のベルト用クッションを使用することにより『サスティーンストラップ』は繰り返し使用が可能です。無駄なく清潔な患者固定が実現します。

肌に優しい柔らかさ

- 『サスティーンストラップ用クッション』は、体圧分散フォーム『サスティーン』を使用し、患者さんに不快感を与えることなく体位の固定が可能です。
- 皮膚への影響が少ないラテックスフリー。



『サスティーン』の表面
(きめが細かくスムーズ)

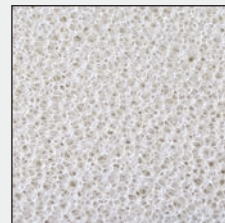

普通のウレタンフォームの表面
(気泡が粗くざらついている)

仕様

品 番	商 品 名	規 格
1-501-000-94	サスティーンストラップ	幅100mm×長さ1600mm 2個入
1-501-000-95	サスティーンストラップ用クッション*	幅140mm×長さ800mm×厚み20mm 8個入


* 単回使用



1-501-000-94 サスティーンストラップ



1-501-000-95 サスティーンストラップ用クッション

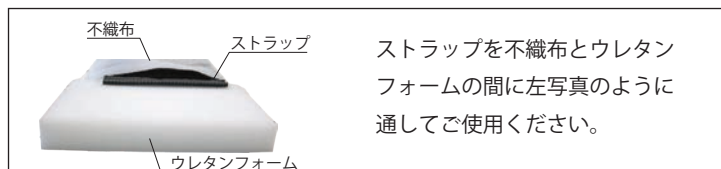

ストラップを不織布とウレタンフォームの間に左写真のように通してご使用ください。



使用例



使用上の注意

- ご使用前に『サスティーンストラップ』に『サスティーンストラップ用クッション』をセットのうえ、ご使用ください。
- 手術台レールに『サスティーンストラップ』を通して、固定してください。
- 『サスティーンストラップ用クッション』は、再利用しないでください。

製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**
本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14
TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022
URL: <https://www.isomed.co.jp/>



▲製品詳細サイト